



Triad® Material para Provisorio de Coronas y Puentes



Diseño manual de provisorios

Triad® VLC Material para Provisorio de un solo componente, es un material de foto polimerización a base de uretano dimetacrilato, diseñado para la fabricación de restauraciones estéticas provisionales, para dientes preparados para coronas, puentes, inlays y onlays. Este material en barras se provee en (7) tonos del color del diente, correlativos aproximadamente a 17 colores de la guía Bioform (veáse la tabla debajo). Triad Material para provisorios puede ser endurecido en boca con una lámpara de luz halógena como Spectrum™ de Dentsply. Sin embargo, las propiedades físicas se alcanzarán de manera completa utilizando la unidad de foto polimerización Triad®.

Triad Material para provisorio

Extra claro
Claro
Medio
Amarillo medio
Oscuro
Marrón Oscuro
Esmalte

Colores Similares en Coronas y Puentes

Ninguna correlación (para odontopediatría)
B-59 (B1), B-51 (A1), B-91 (C1)
B-63, B-65, B-53 (A2)
B-55, B-56, B-77
B-94 (C2), B-95 (C3), B-93 (D3), B-69 (D4)
B-81, B-83, B-84, B-96
Para efectos incisales



Hacer una cubeta con el molde del paciente para poder utilizarla de matriz .



Seleccione el color deseado de Material para Provisorio y colóquelo en la matriz



Presione la matriz llena en el lugar sobre las preparaciones lubricadas del diente usando las áreas adyacentes como guía.



Levante la matriz parcialmente del diente preparado y retórnala a la posición asentada tres (3) o cuatro (4) veces.

Este paso "bruñe" la superficie interna del diente preparado, ayudando a eliminar los socavados permitiendo una mejor adaptación marginal



Fotopolimerizar por 30 segundos con lámpara de luz halógena la superficie vestibular y lingual. Quitar la matriz y el provisorio de la boca y evaluar



Colocar la matriz con el provisorio en la unidad de polimerización Triad durante dos (2) minutos



Remover el provisorio de la matriz y volver a colocar el diente preparado en la boca para controlar las áreas de contacto y la oclusión final.



Recortar el provisorio polimerizado con una fresa. Nota: El provisorio no está completamente curado en este paso.



Enjuague el provisorio a fondo y aplique una capa de Triad Air Barrier Coating (ABC).



Retornar el provisorio a la unidad de polimerización Triad, para una polimerización final de 8 minutos



Retire con cuidado los restantes del Triad ABC con un cepillo suave y agua tibia. Acabado, pulido, y cementado.

DENTSPLY

Trubyte®
Triad®
Light Curing System